

Сделано в Японии
Гарантия 5 лет

2010 | MEIJI TECHNO | ОПЕРАЦИОННЫЕ МИКРОСКОПЫ ДЛЯ СТОМАТОЛОГИИ



 **MEIJI
TECHNO**
Только для профессионалов



О КОМПАНИИ

В Японии три основных производителя микроскопов, но только Meiji Techno производит исключительно микроскопы.

В 1964 году для производства микроскопов была основана компания Azuma Optics, которая быстро завоевала хорошую репутацию благодаря высокому качеству и быстрым срокам поставки продукции. В 1975 году компания была преобразована в Meiji Techno, которая начала предлагать на рынке микроскопы под маркой Meiji Techno.

Начав как производитель учебных микроскопов, компания Meiji Techno расширила ассортимент продукции до микроскопов, предназначенных для технологических работ и лабораторных исследований в медико-биологических и технических направлениях, включая образование. Продукция продается по всему миру — в Европе, Азии, Африке и Америке агентами или дистрибьюторами, авторизованными компанией Meiji Techno.

За многие годы компания Meiji Techno организовала представительства в разных частях мира (Америка, Великобритания, Европа, Россия и СНГ), а также построила широкую дилерскую сеть, которая объединяет высококвалифицированных специалистов, обладающих знанием и опытом во многих областях науки и техники.

Гарантия на механические части микроскопов — 5 лет, на электронные компоненты — 1 год.

Вне зависимости от того, где вы находитесь и каковы ваши требования, продукция компании Meiji Techno и профессионализм наших специалистов помогут вам достичь ваших целей в области микроскопических методов исследования.



СОДЕРЖАНИЕ

Страница	Раздел
007–011	Стоматологический операционный микроскоп MJ 9200D со встроенной HD видеокамерой
013–017	Стоматологический операционный микроскоп MJ 9200D с автоматическим перемещением X-Y
019–023	Стоматологический операционный микроскоп MJ 9200Z с ZOOM увеличением
025–09	Портативный стоматологический операционный микроскоп MJ 9100
031–033	Фото- и видеодокументация для операционных микроскопов
035–037	Стереомикроскопы для зуботехников BM & BMK
040	Контакты

Применение операционных микроскопов в стоматологии

Операционный микроскоп для стоматологии Meiji Techno соответствует требованиям микрохирургии.

Во-первых, обеспечивает увеличение от 6 до 50 раз, имеет источник холодного освещения и возможность регулировки увеличения и фокусного расстояния хирургом во время операции.

Во-вторых, операционный микроскоп может перемещаться в любом направлении по горизонтальной плоскости и имеет угол наклона головки от 0° до 90°.

В-третьих, бинокулярная система для ассистента дает обзор того же операционного поля, что и у хирурга.

В-четвертых, микроскоп может быть оснащен фото- и видеокамерой.

Крепление микроскопа на H-образный штатив или на стол.

Операционный микроскоп Meiji Techno обеспечивает освещение большого операционного поля.

Микрохирургия — это высокоточная хирургическая операция, выполняемая с помощью операционного микроскопа. Искусство хирургии постоянно возрастает. Применение операционного микроскопа Meiji Techno позволяет максимально щадить анатомические структуры и восстанавливать их с почти абсолютной точностью. Если атравматичная хирургия заменила сантиметры на миллиметры, то микрохирургия ознаменовала собой новую эру — хирургию микрона (O'Brier B., 1981).

Микроскопы Meiji Techno характеризуются высококачественной оптикой с большой глубиной резкости и полем зрения, плавным увеличением, электроприводом фокусировки, просветленной оптикой и равномерным освещением.

Для обеспечения безопасности пациента операционные микроскопы Meiji Techno имеют встроенный тепловой фильтр для исключения нагрева операционного поля.

Операционные микроскопы Meiji Techno высокоэффективны для применения в самых сложных стоматологических ситуациях при операциях в эндодонтии, реставрации, имплантации, при работе в труднодоступных каналах.



Возможности применения расширяются при использовании осевых линз с различным рабочим расстоянием.

Большой набор принадлежностей обеспечивает возможность выполнения операции с ассистентами, проводить фото- и видеозаписи.

Основные преимущества работы с микроскопом заключаются в том, что с его помощью можно увидеть большое число мелких деталей. В итоге специалист имеет возможность значительно повысить качество своей работы.


С помощью операционного стоматологического микроскопа возможны следующие манипуляции:

- Удаление остаточного пломбировочного материала перед установкой дентального имплантата.
- Раскрытие, прохождение и пломбирование каналов в труднодоступных зубах.
- Микрохирургические манипуляции при работе с мягкими тканями челюстно-лицевой области.
- Резекция верхушек корней с последующей ретроградной пломбировкой каналов при наличии очага воспаления в области верхушки корня или obturировании канала инородным телом.
- Эстетическое протезирование во фронтальном отделе.
- Препарация зубов при фиксации ортопедических конструкций.
- Максимально точная и атравматичная работа с мягкими тканями.
- Качественная ревизия дефекта.



MJ 9200D

Стоматологический операционный микроскоп
со встроенной HD видеокамерой

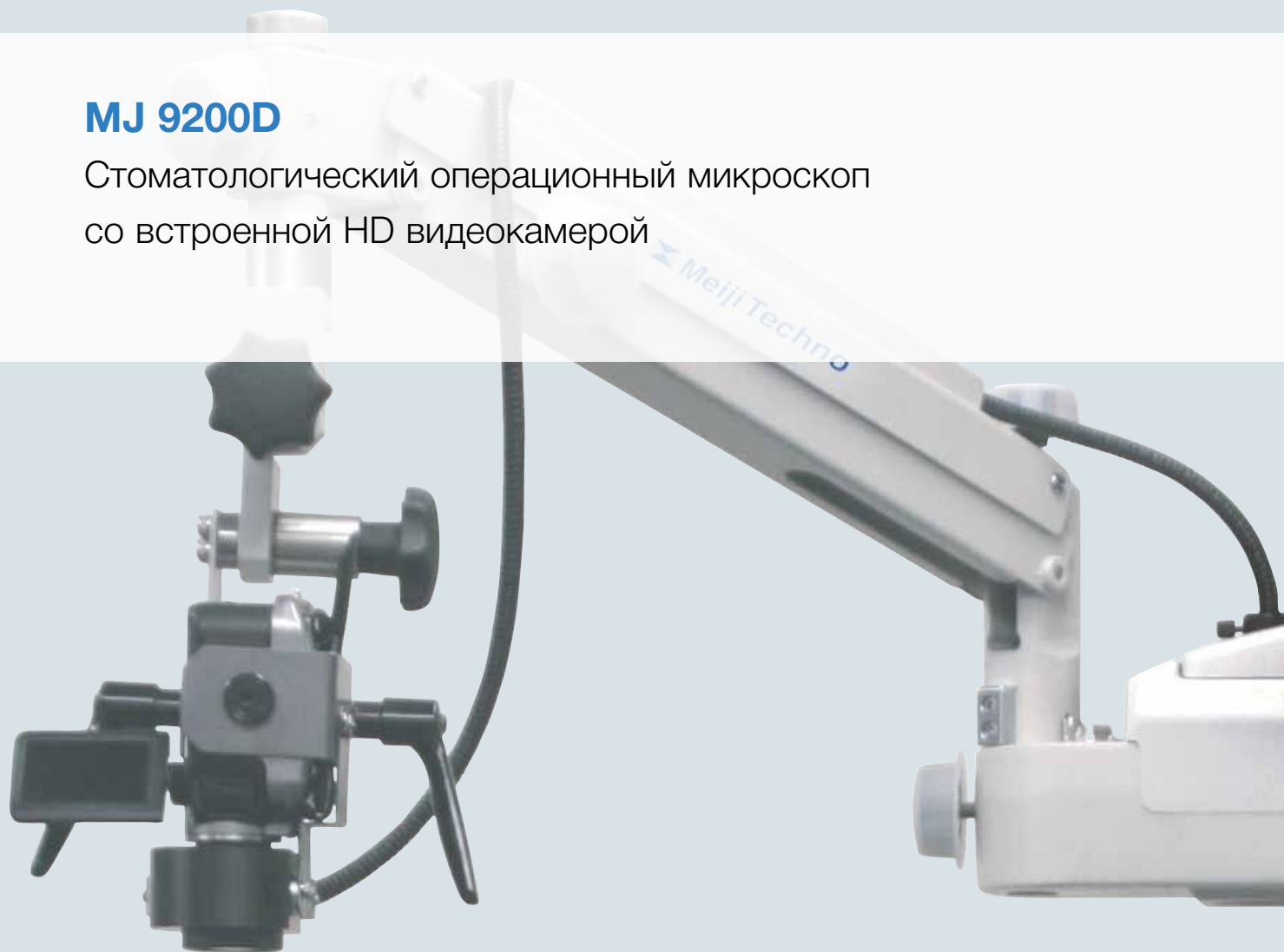



MJ 9200D

Введение

Стоматологический операционный микроскоп со встроенной HD видеокамерой.

Встроенная HD видеокамера с жидкокристаллическим дисплеем.

Высококачественная оптика с большой глубиной резкости и полем зрения.

Изменение рабочего расстояния путем установки осевых линз.

Легкое управление, устойчивое компактное основание и длинная опорная стойка.

Электропривод фокусировки.

Два гнезда для ламп с возможностью быстрого переключения на резервную лампу при перегорании во время операции.

Штатив с H-образным основанием.

Характеристики

Микроскоп	
Тип	Микроскоп Галилея
Смена увеличения	5-ступенчатая при вращении барабана
Общее увеличение	4x, 6x, 10x, 16x, 25x
Поле зрения	51–8 мм
Фокусное расстояние	F=250 мм
Наклон головки микроскопа	0–90°
Фото- и видеодокументация	
Камера	Встроенная HD с жидкокристаллическим дисплеем
Управление	
Модель	Ножной или ручной блок (опция) управления
Освещение	
Фильтры	Желтый, 1/2 нейтральной плотности
Источник света	Галогеновая лампа 15 В/150 Вт, тепловой фильтр
Яркость	85 000 люкс
Поле коаксиального освещения	57 мм
Вертикальная точная фокусировка	
Модель	Электрическая, с двигателем
Настройка фокусирования	40 мм
Скорость фокусирования	1,3 мм/сек



MJ 9200D

Информация для заказа

Модель	Характеристики
MJ 9200D (ver. 1)	<p>Стоматологический операционный микроскоп MJ 9200D со встроенной HD видеокамерой и жидкокристаллическим дисплеем, 5-ступенчатая смена увеличения при вращении барабана, общее увеличение: 4x, 6x, 10x, 16x, 25x, фокусное расстояние F=250 мм, электропривод фокусировки, угол наклона головки 0–90°, галогеновое освещение 15 В/150 Вт, тепловой фильтр, поле освещения 57 мм, максимальная яркость 85 000 люкс, фильтры: желтый, 1/2 нейтральной плотности, штатив с H-образным основанием</p>

Компоненты и принадлежности

Дополнительные линзы

- MJ-Z0013** Линза объектива для операционного микроскопа, с регулировкой фокусного расстояния, F=200 мм
- MJ-Z0014** Линза объектива для операционного микроскопа, с регулировкой фокусного расстояния, F=250 мм
- MJ-Z0015** Линза объектива для операционного микроскопа, с регулировкой фокусного расстояния, F=350 мм

Управление

- MJ-Z0016** Ножной блок управления микроскопом
- MJ-Z0017** Ручной блок управления микроскопом

Другие компоненты и принадлежности

- MJ0960-H1** Запасная лампа 15 В/150 Вт




HD видеочамера с дисплеем



Плавное перемещение вправо и влево

Фото- и видеодокументация

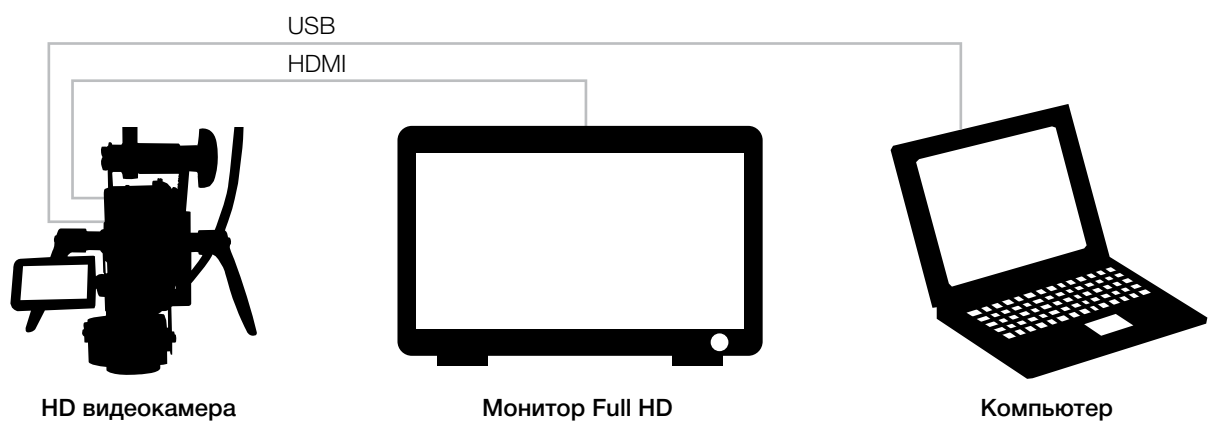

HD видеочамера

Монитор Full HD

Компьютер

MJ 9200D

Стоматологический операционный микроскоп с автоматическим перемещением X-Y





MJ 9200D

Введение

Стоматологический операционный микроскоп с автоматическим перемещением X-Y.

Высококачественная оптика с большой глубиной резкости и полем зрения.

Изменение рабочего расстояния путем установки осевых линз.

Легкое управление, устойчивое компактное основание и длинная опорная стойка.

Настройка межзрачкового расстояния и диоптрий.

Электропривод фокусировки и перемещения X-Y.

Два гнезда для ламп с возможностью быстрого переключения на резервную лампу при перегорании во время операции.

Штатив с H-образным основанием.

Фото- и видеодокументация.

Характеристики

Микроскоп	
Тип	Бинокулярный микроскоп Галилея
Смена увеличения	5-ступенчатая при вращении барабана
Окуляры	12,5x
Общее увеличение	4x, 6x, 10x, 16x, 25x
Поле зрения	51–8 мм
Настройка межзрачкового расстояния	50–75 мм
Фокусное расстояние	F=250 мм
Диоптрийная настройка	-6 – +5 D
Наклон головки микроскопа	0–90°
Управление	
Модель	Ножной или ручной блок (опция) управления
Освещение	
Фильтры	Желтый, 1/2 нейтральной плотности
Источник света	Галогеновая лампа 15 В/150 Вт, тепловой фильтр
Яркость	85 000 люкс
Поле коаксиального освещения	57 мм
Перемещение X-Y	
Модель	Электрическая, с двигателем
Диапазон перемещения	X: 40 мм, Y: 40 мм
Вертикальная точная фокусировка	
Модель	Электрическая, с двигателем
Настройка фокусирования	40 мм
Скорость фокусирования	1,3 мм/сек



MJ 9200D

Информация для заказа

Модель	Характеристики
MJ 9200D (ver. 2)	<p>Стоматологический операционный микроскоп MJ 9200D с автоматическим перемещением X-Y, бинокулярная головка, 5-ступенчатая смена увеличения при вращении барабана, общее увеличение: 4x, 6x, 10x, 16x, 25x, фокусное расстояние F=250 мм, электропривод фокусировки, широкопольные окуляры 12,5x, угол наклона головки 0–90°, галогеновое освещение 15 В/150 Вт, тепловой фильтр, поле освещения 57 мм, максимальная яркость 85 000 люкс, фильтры: желтый, 1/2 нейтральной плотности, штатив с H-образным основанием</p>

Компоненты и принадлежности

Оптические насадки

- MJL-0542** Монокулярная смотровая головка с возможностью вращения изображения для ассистента
- MJL-0542-СВ** Коаксиальная бинокулярная смотровая головка для ассистента
- MJL-0541** Разделитель светового потока, 50/50
- MJL-0541В** Разделитель светового потока, тип In-Out (с возможностью выключения дополнительного выхода), 50/50
- MJL-0548** Адаптер для крепления под углом 45°

Окуляры

- MJOCL-001W** Окуляр 12,5x
- MJOCL-002W** Окуляр 16x

Фото- и видеомикроскопия

- MJL-0544** Адаптер для видеокамеры с разъемом C-mount (F=100 мм)
- MJL-0543** Адаптер для крепления фотокамер
- MJL-0515** Адаптер для крепления зеркальной фотокамеры
- MJ-NF-EF** Кольцо для крепления зеркальной фотокамеры Canon EOS
- MJ-OV330** Цветная видеокамера CAM V1100

Дополнительные линзы

- MJ-Z0013** Линза объектива для операционного микроскопа, с регулировкой фокусного расстояния, F=200 мм
- MJ-Z0014** Линза объектива для операционного микроскопа, с регулировкой фокусного расстояния, F=250 мм
- MJ-Z0015** Линза объектива для операционного микроскопа, с регулировкой фокусного расстояния, F=350 мм

Управление


- MJ-Z0016** Ножной блок управления микроскопом
- MJ-Z0017** Ручной блок управления микроскопом

Другие компоненты и принадлежности

- MJ0960-H1** Запасная лампа 15 В/150 Вт



Ручной блок управления

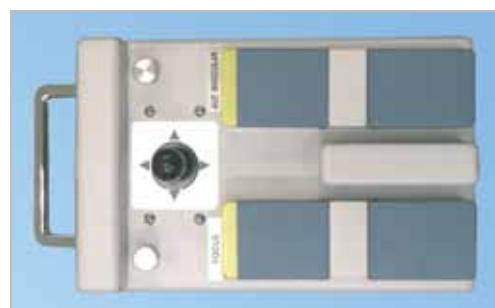

Ножной блок управления



Быстрое включение резервного освещения



Плавное перемещение вправо и влево

MJ 9200Z

Стоматологический операционный микроскоп
с ZOOM увеличением





MJ 9200Z

Введение

Высококачественная оптика с большой глубиной резкости и полем зрения.

Изменение рабочего расстояния путем установки осевых линз.

Легкое управление, устойчивое компактное основание и длинная опорная стойка.

Настройка межзрачкового расстояния и диоптрий.

Электропривод фокусировки, напольная педаль.

Галогеновый источник холодного света.

Два гнезда для ламп с возможностью быстрого переключения на резервную лампу при перегорании во время операции.

Штатив с H-образным основанием.

Фото- и видеодокументация.

Характеристики

Микроскоп	
Тип	Бинокулярный микроскоп Галилея
Смена увеличения	плавная (ZOOM) при вращении барабана
Окуляры	12,5x
Общее увеличение	5–30x
Поле зрения	49–9 мм
Настройка межзрачкового расстояния	50–75 мм
Фокусное расстояние	F=250 мм
Диоптрийная настройка	–6 – +5 D
Наклон головки микроскопа	0–90°
Педаль управления	
Модель	Напольная педаль
Освещение	
Фильтры	Кобальтовый, синий, 1/2 нейтральной плотности
Источник света	Галогеновая лампа 15 В/150 Вт, тепловой фильтр
Яркость	110 000 люкс
Поле коаксиального освещения	50 мм
Вертикальная точная фокусировка	
Модель	Электрическая, с двигателем
Настройка фокусирования	40 мм
Скорость фокусирования	1,3 мм/сек



MJ 9200Z

Информация для заказа

Модель	Характеристики
MJ 9200Z (DENT)	<p>Стоматологический операционный микроскоп MJ 9200Z с ZOOM увеличением, бинокулярная головка, плавная (ZOOM) смена увеличения при вращении барабана, общее увеличение 5–30х, фокусное расстояние F=250 мм, электропривод фокусировки, широкопольные окуляры 12,5 х, угол наклона головки 0–90°, галогеновое освещение 15 В/150 Вт, тепловой фильтр, поле освещения 50 мм, максимальная яркость 110 000 люкс, фильтры: кобальтовый, синий, 1/2 нейтральной плотности, штатив с H-образным основанием</p>

Компоненты и принадлежности

Оптические насадки

- MJL-0542** Монокулярная смотровая головка с возможностью вращения изображения для ассистента
- MJL-0542-CB** Коаксиальная бинокулярная смотровая головка для ассистента
- MJL-0541** Разделитель светового потока, 50/50
- MJL-0541B** Разделитель светового потока, тип In-Out (с возможностью выключения дополнительного выхода), 50/50
- MJL-0548** Адаптер для крепления под углом 45°



Разделитель светового потока, 50/50

Окуляры

- MJOCL-001W** Окуляр 12,5x
- MJOCL-002W** Окуляр 16x



Окуляры 12,5x и 16x

Фото- и видеомикроскопия

- MJL-0544** Адаптер для видеокамеры с разъемом C-mount (F=100 мм)
- MJL-0543** Адаптер для крепления фотокамер
- MJL-0515** Адаптер для крепления зеркальной фотокамеры
- MJ-NF-EF** Кольцо для крепления зеркальной фотокамеры Canon EOS
- MJ-OV330** Цветная видеокамера CAM V1100




Адаптер для видеокамеры C-mount

Дополнительные линзы

- MJ-OBJ-A008** Линза объектива для операционного микроскопа, F=175 мм, рекомендуется для офтальмологии
- MJ-OBJ-001** Линза объектива для операционного микроскопа, F=200 мм, рекомендуется для оторинологии, пластической хирургии
- MJ-OBJ-003** Линза объектива для операционного микроскопа, F=300 мм, рекомендуется для нейрохирургии
- MJ-OBJ-012** Линза объектива для операционного микроскопа, F=350 мм, рекомендуется для ларингологии
- MJ-OBJ-014** Линза объектива для операционного микроскопа, F=400 мм, рекомендуется для ларингологии

Другие компоненты и принадлежности

- MJYF** Желтый фильтр (устанавливается вместо одного из существующих фильтров при производстве микроскопа)
- MJ0960-H1** Запасная лампа 15 В/150 Вт

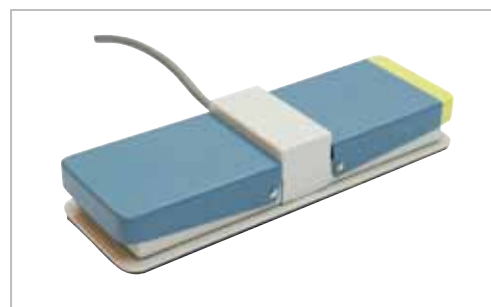

Напольная педаль

MJ 9100

Портативный стоматологический операционный микроскоп





MJ 9100

Введение

Высококачественная оптика с большой глубиной резкости и полем зрения.

Изменение рабочего расстояния путем установки осевых линз.

Настройка межзрачкового расстояния и диоптрий.

Плавная смена увеличения (ZOOM).

Адаптер для крепления под углом 45°.

Легкое управление, устойчивое компактное основание.

Крепление к столу или к штативу с H-образным основанием.

Модель 9100 упаковывается в транспортный кейс. Транспортный кейс входит в комплект поставки.

Галогеновый источник холодного света с возможностью быстрой замены лампы.

Фото- и видеодокументация.

Характеристики

Микроскоп	
Тип	Бинокулярный микроскоп Галилея Адаптер для крепления под углом 45°.
Смена увеличения	Плавная (ZOOM) при вращении барабана
Окуляры	15x
Общее увеличение	6–18x
Поле зрения	35–10 мм
Настройка межзрачкового расстояния	50–75 мм
Фокусное расстояние	F=250 мм
Диоптрийная настройка	± 6 D
Наклон головки микроскопа	0–90°
Освещение	
Фильтры	Кобальтовый, синий, 1/2 нейтральной плотности
Источник света	Галогеновая лампа 21 В/150 Вт, тепловой фильтр
Яркость	80 000 люкс
Поле коаксиального освещения	40 мм
Вертикальная точная фокусировка	
Модель	Ручная
Настройка фокусирования	30 мм


MJ 9100

Информация для заказа

Модель	Характеристики
MJ 9100 (DENT)	Портативный многоцелевой операционный микроскоп MJ 9100, бинокулярная головка, адаптер для крепления под углом 45°, плавная регулировка степени увеличения (функция ZOOM), общее увеличение 6–18х, поле зрения 35–10 мм, фокусное расстояние F=250 мм, широкопольные окуляры 15х, угол наклона головки 0–90°, галогеновое освещение 21 В/150 Вт, тепловой фильтр, поле освещения 40 мм, максимальная яркость 80 000 люкс, фильтры: кобальтовый, синий, 1/2 нейтральной плотности, система крепления на стол, транспортный кейс

Компоненты и принадлежности

Оптические насадки

- MJL-0542** Монокулярная смотровая головка с возможностью вращения изображения для ассистента
- MJL-0542-CB** Коаксиальная бинокулярная смотровая головка для ассистента
- MJL-0541** Разделитель светового потока, 50/50
- MJL-0541B** Разделитель светового потока, тип In-Out (с возможностью выключения дополнительного выхода), 50/50

Окуляры

- MJOCL-009** Окуляр 15x, 1 шт.

Фото- и видеомикроскопия

- MJL-0544** Адаптер для видеокамеры с разъемом C-mount (F=100 мм)
- MJL-0543** Адаптер для крепления фотокамер
- MJL-0515** Адаптер для крепления зеркальной фотокамеры
- MJ-NF-EF** Кольцо для крепления зеркальной фотокамеры Canon EOS
- MJ-OV330** Цветная видеокамера CAM V1100

Дополнительные линзы

- MJ-OBJ-001** Линза объектива для операционного микроскопа, F=200 мм, рекомендуется для оторинологии, пластической хирургии
- MJ-OBJ-002** Линза объектива для операционного микроскопа, F=250 мм, рекомендуется для общей хирургии
- MJ-OBJ-003** Линза объектива для операционного микроскопа, F=300 мм, рекомендуется для нейрохирургии
- MJ-OBJ-012** Линза объектива для операционного микроскопа, F=350 мм, рекомендуется для ларингологии
- MJ-OBJ-014** Линза объектива для операционного микроскопа, F=400 мм, рекомендуется для ларингологии

Другие компоненты и принадлежности

- MJ-YF-57** Желтый фильтр (устанавливается дополнительным блоком)
- MJL-0940-H1** Запасная лампа 21 В/150 Вт

Штативы

- MJK-1422** Штатив для портативного микроскопа MJ 9100, с H-образным основанием



Адаптер для крепления зеркальной фотокамеры



Дополнительные линзы



MJ 9100 на штативе

Фото- и видеодокументация





Разделитель светового потока, 50/50



Разделитель светового потока,
тип In-Out, 50/50



Адаптер для видеокамеры C-mount



Адаптер для крепления фотокамер и
зеркальной фотокамеры



Кольцо для крепления зеркальной
фотокамеры Canon EOS

Оптические насадки

MJL-0541 Разделитель светового потока, 50/50

MJL-0541B Разделитель светового потока, тип In-Out (с возможностью
выключения дополнительного выхода), 50/50

Видеомикроскопия

MJL-0544 Адаптер для видеокамеры с разъемом C-mount (F=100 мм)

MJ-OV330 Цветная видеокамера CAM V1100

SLR фотомикроскопия

MJL-0543 Адаптер для крепления фотокамер

MJL-0515 Адаптер для крепления зеркальной фотокамеры

MJ-NF-EF Кольцо для крепления зеркальной фотокамеры Canon EOS



Видеокамера CAM V1100

Подключается к телевизору, видеомонитору или проектору через S-Video/ RCA вход.

Подключение к персональному компьютеру, имеющему карту захвата изображения.

Процессор цифровой обработки сигнала улучшает качество изображения.

Интеллектуальная компенсация засветки.

Режимы ручной и автоматической установки экспозиции и баланса белого.

Характеристики

Размер матрицы	1/2 дюйма
Стандарт	PAL
Сканирование	2:1 межстрочное сканирование
Разрешение	480 ТВ линий (S-Video), 450 ТВ линий (RCA)
Видеовыходы	S-Video компонентный, BNC композитный
Минимальная освещенность	0,1 люкс при диафрагме f=1,2
Электронный затвор	1. 1/50, 2. 1/120, 3. 1/250, 4. 1/500, 5. 1/1000, 6. 1/2000, 7. 1/4000, 8. 1/10000, 9. EI: OFF 1/50–1/100000, 10. EI: FL 1/120–1/100000
Отношение сигнал/шум	50 дБ
Крепление объектива	C-mount
Автоматическое управление диафрагмой	постоянным током DC/Video автоматическое управление (переключаемое)
Баланс белого	ATW (автоматический), PWB, MWB (ручной), 3200, 4300, 5100, 6300 K
Коррекция гаммы	0,45/1,0



Цифровая зеркальная камера Canon EOS

CMOS-датчик с низким уровнем шума.

Яркий ЖК-экран для просмотра изображений.

Процессор обработки изображений DIGIC.

Высокоточная система автофокусировки.

Режимы ручной и автоматической установки экспозиции и баланса белого.

BM & BMK

Стереомикроскопы для зуботехников





BM & BMK

Серия BM и BMK — это высококачественные стереомикроскопы для зуботехников. Они установлены на 255 мм горизонтальной наклоняемой стреле и прикреплены к 300 мм вертикальному шесту на тяжелом основании. Встроенные осветители на модели BM имеют конденсор с тремя линзами в бинюляре и источник питания 6 В в основании. У моделей серии BMK осветители крепятся сбоку на поворотной шаровой опоре. Пара сменных парфокальных объективов установлены в слайдере.

- Прямое стереоскопическое изображение
- Высококачественная оптика с увеличенным рабочим расстоянием
- Регулируемый осветитель
- Увеличение от 2,5х до 70х (с дополнительными линзами)
- Бинюляр под наклоном 45° устанавливается на высоте до 330 мм (только у BMK)
- Межзрачковое расстояние 51–80 мм
- Пара сменных парфокальных объективов в быстросменном слайдере типа «ласточкин хвост»

Размеры:

- Максимальная высота: 330 мм
- Максимальный радиус работы: 330 мм
- Основание: 200x140x60 мм
- Вес: 8,6 кг

Таблица увеличений

Увеличение объектива		Окуляры				Рабочее расстояние
		WF5x (опция)	WF10x	WF15x (опция)	WF20x (опция)	
1x (MA106, MA161)	Увеличение	5x	10x	15x	20x	170 мм
	Поле зрения	21 мм	20 мм	13 мм	10 мм	
2x (MA107, MA163)	Увеличение	10x	20x	30x	40x	107 мм
	Поле зрения	10,5 мм	10 мм	6,5 мм	5,0 мм	
3x (MA109, MA163)	Увеличение	17.5x	35x	52.5x	70x	70 мм
	Поле зрения	6 мм	5,7 мм	3,7 мм	3,7 мм	
0.5x (MA113)	Увеличение	2,5x	5x	7,5x	10x	106 мм
	Поле зрения	42 мм	40 мм	26 мм	20 мм	

Компоненты и принадлежности

Окуляры

MA101	Широкопольные окуляры 5x, F.N. 22
MA102	Широкопольные окуляры 10x, F.N. 20 с держателем шкалы 25 мм
MA103	Широкопольные окуляры 15x, F.N. 13 с держателем шкалы 25 мм
MA104	Широкопольные окуляры 20x, F.N. 11 с держателем шкалы 25 мм

Объективы для серии BM

MA113	Пара объективов 0,5x, поле зрения 40 мм, рабочее расстояние 106 мм
MA106	Пара объективов 1,0x, поле зрения 20 мм, рабочее расстояние 170 мм
MA107	Пара объективов 2,0x, поле зрения 10 мм, рабочее расстояние 107 мм
MA109	Пара объективов 3,5x, поле зрения 7 мм, рабочее расстояние 70 мм

Объективы для серии BMK

MA161	Пара объективов 1,0x, поле зрения 20 мм, рабочее расстояние 170 мм
MA162	Пара объективов 2,0x, поле зрения 10 мм, рабочее расстояние 107 мм
MA163	Пара объективов 3,5x, поле зрения 5,7 мм, рабочее расстояние 70 мм

Серия BM информация для заказа

Модель	Объектив	Окуляры	Увеличение	Осветитель
BM-1	1x и 2x	WF10x	10x и 20x	Наклоняемый вольфрамовый осветитель падающего света 6 В/1,2 А
BM-2	1x , 2x и 3,5x		10x, 20x и 35x	

Серия BMK информация для заказа

Модель	Объектив	Окуляры	Увеличение	Осветитель
BMK-1	1x и 2x	WF10x	10x и 20x	Наклоняемый вольфрамовый осветитель падающего света 6 В/1,2 А
BMK-2	1x , 2x и 3,5x		10x, 20x и 35x	

MEIJI TECHNO CO., Ltd.
322-1, Chikumazawa, Miyoshi-machi
Iruma-gun, Saitama 354-0043, Japan
tel.: +81 (49) 259 01 11
fax: +81 (49) 259 01 13
meiji@meijitechno.co.jp

www.meijitechno.com
www.meijitechno.ru

MEIJI TECHNO RUSSIA and CIS

WEST MEDICA
Hegelgasse 19, A-1010, Vienna, Austria
tel.: +43 (1) 804 81 84
fax: +43 (1) 804 81 85
vienna@westmedica.com

ВЕСТ МЕДИКА
129075, Москва, ул. Шереметьевская 85, стр. 2
тел.: +7 (495) 940-61-33
факс: +7 (495) 619-98-84
moscow@westmedica.com

Мы оставляем за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления

Официальный дистрибьютор